

## Provtagningsanvisning F-Kalprotektin

**Utförs på:**  
Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby

### 1 Indikation

Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Uppföljning av sjukdomsförlopp och terapieffekt vid inflammatorisk tarmsjukdom.

### 2 Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

### 3 Provtagning och provhantering

**Faecesprov:** Faecesburk med sked.  
Fyll burken till en fjärdedel.  
Prov ska inte tas under pågående menstruation på grund av risk för falskt förhöjda värden.

**Centrifugering:** Ej tillämplig

**Förvaring:** Prov lämnas så snart som möjligt till laboratoriet.  
Prov förvaras i kyla 2-8°C.

### 4 Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

### 5 Analysfrekvens

1 gång/vecka

### 6 Referensintervall, beslutsgräns

Beslutsgräns:  
0-3 år Saknas  
>3 år ≤50 mg/kg

### 7 Bedömning

Förhöjningar ses vid inflammatoriska tillstånd i tarmen men ej vid funktionella rubbningar. Ett resultat under beslutsgränsen utesluter med god sannolikhet inflammatorisk tarmsjukdom.

### 8 Kod

NPU19717