

## LDL-aferes Checklista 4008 ADS

Medicinkliniken Växjö

Datum \_\_\_\_\_

DALI ..... KIT \_\_\_\_\_

DALI priming solution 3000 ml  
med 5 ml Heparin 5000E/ml \_\_\_\_\_

DALI priming solution 3000 ml \_\_\_\_\_

Sign

### Kontroller före start

- Maskin startad test godkänd
- Behandlingsmetod vald .....
- Slangar uppsatta enligt schema
- DALI-konfiguration vald .....
- Adsorber fylld
- Vätskenivå i venkammaren justerad
- Adsorber skakad
- Vätskenivå i adsorber justerad
- Systemet spolat enligt anvisningar

### Kontroller vid start

- Ge ev ordinerad infusion före      Enligt ordination.  
  behandlingen
- Anslut inloppsslangen
- ACD-pump inställd .....
- Ställ in målblodvolym .....
- Anslut returslangen när maskinen  
  detekterar blod
- Starta behandlingen      Öka blodflödet enligt schema
- Utgående larm:      Ljud och ljussignaler fungerar.

Kl	Bltr	Blod- flöde	ACD- pump	Inlopps tryck	Retur tryck	Adsorber tryck	Behandlad blodvolym	

**Slutavläsning** Bltr.....ACD.....Behandlad blodvolym.....Tid.....