

Provtagningsanvisning Ledv-Leukocyter

Utförs på:
Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

1 Indikation

Bedömning av inflammationsgrad i leden.

2 Patientförberedelse

Provtagningen utförs av den beställande läkaren.

3 Provtagning och provhantering

Provtagning EDTA-rör (ej 7 mL)
Centrifugering Centrifugeras ej
Förvaring Provet hållbart 1 dygn i kyl 2-8°C
Provmängd 1-2 mL ledvätska

4 Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

5 Analysfrekvens

Akut/Dagligen

6 Referensintervall, beslutsgräns

$<0,2 \times 10^9/L$

7 Bedömning

Grad av inflammation	Leukocyter $10^9/L$	Exempel på diagnos
Ingen	$<0,2$	Frisk led
Låggradig	<2	Artros
Mild	<15	SLE, villonodös synovit, sarkom
Kraftig	≤ 50	Postinfektiös artrit, psoreasisartropati, reumatoid artrit
Septisk	>50	Stafylococcer, streptococcer, tuberkulos

8 Kod

NPU14082