

Provtagningsanvisning Sem-Spermier, vasektomi

Utförs på:
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

1 Indikation

Kotroll av resultat av manlig sterilisering (vasektomi).

2 Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

3 Provtagning och provhantering

Seminalplasma: Plastburk med lock.
Förvaring: Provet kan förvaras i kyl 2-3 dagar.

4-6 veckor efter det kirurgiska ingreppet lämnar patienten, i en plastburk, ett spermprov till laboratoriet. Provet kan även skickas via närmaste vårdcentral eller med vanlig post. Vid vanlig post används vadderad postpåse enligt postens anvisningar. Provet bör nå laboratoriet inom 2 dygn.

4 Remiss

Cambio COSMIC/REMISS KEMI

5 Analysfrekvens

Vardagar.

6 Referensintervall, beslutsgräns

Ej påvisbart (0/synfält)

7 Bedömning

Efter vasektomi får ingen spermie förekomma. Enstaka spermier visar att det har funnits några spermierester kvar i vesikler och i prostatan som förmodligen är borta tills patienten kommer tillbaka för nästa prov. Ses mer än 10 spermier/synfält bör man misstänka att operationen har misslyckats.

8 Kod

NPU18199