

## Rekommendation avseende Hb på iSTAT

**Gäller för:** Region Kronoberg

Hb svaras inte ut från iSTAT-instrument eftersom dessa instrument inte har automatisk blandning av blodprovet. Det innebär att blodkropparna sedimenterar och svaret blir osäkert, svaret påverkas av hur lång tid provet stått, om och hur det är blandat (manuellt).

Arbetsgrupp Laboratoriemedicin har tagit beslut om ett undantag från denna regel.

Det är mycket viktigt att inte ta större blodvolym än nödvändigt på patienterna på Neonatalavdelningen eftersom patienterna har så liten total blodvolym. Vid kliniska beslut är personalen på Neonatalavdelningen medvetna om bristerna i Hb-svaret och tar kontrollprov som analyseras på kliniskt kemiska laboratoriet vid behov. Fördelarna med ett Hb-svar från iSTAT är större än nackdelen för dessa små barn.

Arbetsgrupp Laboratoriemedicin  
/ Maria Berggren Söderlund, ordförande