

## Anvisning för persondosimeter

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Region Kronoberg

### Kroppsdosmätare

Dosimetern innehåller 4 stycken detektorer vilka är placerade bakom olika filter för att separera den detekterade strålningen i typ av strålning samt energi.

Resultatet rapporteras enligt SSM's författning som Hp(10) samt Hp(0,07).

Etiketten på framsidan av dosimetern innehåller uppgifter bl.a. om startdatum för mätperioden samt användarens namn. En färgkodning på etiketten gör det lätt att se att alla användare är inne på samma mätperiod.

Att tänka på:

- Dosimetern får inte öppnas av användaren!
- Placera dosimetern enligt Figur 1, med etiketten vänd utåt.
- När blyförkläde används skall dosimetern bäras bakom blyförklädet.
- Dosimetern är personlig och får inte bäras av någon annan än den angivna personen.
- Dosimetern skall normalt bäras i 4 veckor.
- Även oanvända dosmätare skall returneras!

**Obs! Dosmätare som inte återsänts inom 6 veckor efter sista användningsdagen debiteras med en förseningsavgift!**

### Extra dosimetrar

Kontakta Medicinsk fysik om ni behöver extra dosimetrar.

#### Figur 1.

Beskrivning av dosmätarens placering.



## 1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## 2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
3	2018-02-28	Ingen förändring