

Placering av gods i diskdesinfektor Lastningens grundprinciper

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Susanna Lundvall, Anette Svensson och Katarina Madehall, Vårdhygien

Allmänt

Instrument och produkter för flergångsbruk måste rengöras efter användning för att avlägsna organiskt material som blod och vävnadsrester och annan typ av förorening. Om det finns rester av organiskt material kvar kan dessa innehålla mikroorganismer som kan spridas mellan patienterna.

Förutsättningen för att uppnå en fullgod desinfektion är att godset är rent.

- Den vanligaste orsaken till att godset inte blir rent är att maskinen överlastas eller att produkterna placeras felaktigt. Vatten och ånga från dysorna måste komma åt både på in- och utsidan.
- Korgar, galler och brickor som används till att placera instrument i diskdesinfektorn skall vara utformade så att vattnet kan nå alla instrument. De skall vara ordentligt perforerade.
- Placera godset så att vattenansamlingar undviks.
- Ihåligt gods som slangar och annat rörformigt gods placeras så rengöring och desinfektion även sker av insidan. Rörformigt gods diskas stående eller kopplat för genomspolning.
- Till rörformigt gods och slangar används specialinsats med anslutningar för genomspolning.
- Ledade instrument som peanger, saxar och tänger ska köras öppnade så att vatten kan tränga in i boxläsen.
- För att hålla mindre/lättare produkter stilla i diskdesinfektorn bör de fästas med till exempel ett perforerat galler eller nät som placeras över godset eller spännas fast med fjädrar.

Instrument som är väl rengjorda och desinfekterade i diskdesinfektor är höggradigt rena och kan användas för renrutin under förutsättning att de hanteras så att de behåller sin renhetsgrad när de tas ut ur maskinen

- Låt instrumenten torka i maskin om möjligt
- Öppna luckan och ta ut instrumenten med nydesinfekterade händer
- Förvara instrumenten i en låda som också är höggradigt ren.
- Inhalationsprodukter torkar inte alltid i maskin. Kan torkas på ren bänk på rent underlag.

För mer information, se länk

[Utbildningsdokument från Svensk förening för vårdhygien](#)

Exempel på placering av gods i diskdesinfektor:



Exempel på placering av gods i diskdesinfektor med genomspolning:



Nationella Vårdhandboken [Desinfektionsapparatur](#)

Vi upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig kontakta faktaägare.