

Borstprov

Gäller för: Klinisk patologi och cytologi

Utförs på: Cytologavdelningen

Borstprov från bronk

Provmaterialet strykes ut på två objektglas med frostad kant märkt med fullständigt personnummer och initialer.

Det ena glaset spritfixeras omedelbart i 95% etanol (ca 30 min) och märks S medan det andra glaset lufttorkas och märks L.

Resterande material på borsten vispas kraftigt ner i en ThinPrep-burk (i förväg märkt med Cosmic-etikett) så att cellerna lossnar. Märk burken bronkborste.

Om material tagits från olika lokalisationer skall detta märkas på glas, burkar och remiss!

Bronskölvätska

Skölj med ca 5 ml fysiologisk koksaltlösning.

För över provet till ThinPrep-burk (i förväg märkt med Cosmic-etikett). Blanda väl och märk burken bronkskölj.

Om material tagits från olika lokalisationer skall detta märkas på burkar och remiss!

OBS!

Vid provtagning av både borstprov och bronkskölvätska ska det vara **en remiss till varje prov.**