

Rengöring och desinfektion av CuroCell® 4 madrass

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Katarina Madehall, Anette Svensson och Susanna Lundvall,
Vårdhygien

Madrassöverdrag, inneröverdrag/distanstyg

Under varje patients användningstid

- Rengör madrassöverdraget med engångs mikrofiberduk fuktad med vatten en ggr/v.
- Vid behov tvättas madrassöverdraget i minst 60 °C
Inneröverdrag/distanstyg tvättas då madrassöverdraget tvättas och madrassceller rengörs med engångs mikrofiber duk fuktad med vatten och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid.

Efter varje patient

- Rengör madrassöverdraget, pump, slangar och CPR-ventil med engångs mikrofiberduk, fuktad med vatten. Låt torka.
- Desinfektera därefter ovanstående delar med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid.
- Öppna dragkedjan och kontrollera att inneröverdraget/distanstyget och madrassceller är synligt rena.
- Är inneröverdraget/distanstyget förorenat eller skadat ska madrassen kasseras.

Efter tvätt

- Kontrollera madrassöverdrag, innertyg/distanstyg. Skadade produkter kasseras.
- Förvara madrassen på så sätt att den behåller sin renhetsgrad.

Nationella Vårdhandboken [Sängen, vårbädden](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.