

Rengöring och desinfektion av CuroCell® 4 madrass

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall, Vårdhygien

Madrass och tillbehör rengörs och desinfekteras

- Vid behov under användningstiden
- Mellan varje patient

Pump, slangar och CPR-ventil

- Rengör och desinfektera med ytdesinfektionsmedel.

Madrassöverdrag, inneröverdrag/distanstyg

Under varje patients användningstid

- Rengör och desinfektera madrassöverdraget med ytdesinfektionsmedel.
- Vid behov tvättas madrassöverdragetl vid 60 grader C
- Inneröverdrag/distanstyg tvättas då madrassöverdraget tvättas och madrassceller rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel

Efter varje patient

- Rengör och desinfektera madrassöverdraget med ytdesinfektionsmedel
- Kontrollera att inneröverdraget/distanstyg och madrassceller är synligt rena.
- Är inneröverdrag/distanstyg förorenade tvättas madrassöverdrag, inneröverdrag/distanstyg vid 60 grader C. Madrassceller rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel.

Efter tvätt

- Kontrollera madrassöverdrag, innertyg/distanstyg. Skadade produkter kasseras.

Nationella Vårdhandboken [Sängen, vårbädden](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.