

Daglig kontroll av nätverkskommunikation för Mobimed och VIS-dator Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Kontrollera kommunikationsuppkoppling mot LtKronoberg

- Kontrollera att mätenheten fungerar
- Kontrollera att VIS-datorn fungerar

1. Kontrollera mobimeduppkoppling mot LTKronoberg

Om mobimedan har kontakt med sjukhuset ser det ut som nedan längst upp i höger hörn. (KronNet ska inte ha ett streck över sig)




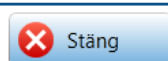
När man klickar på ”KronNet-ikonen” syns följande meddelande om mobimedan är inkopplad till det interna modemmet (i 67-9010 finns endast detta modem):

 Best adapter to server: GPRS



I alla övriga ambulanser ska det se ut som någon av nedanstående dialogrutor. Då använder mobimedan det bästa nätet samt fungerar VIS-datorn.

 Best adapter to server: HighSpeed USB-Ethernet Adapter



eller:



Vid fel:

Felsök om du har kunskap om det hela eller kontakta någon som kan. I annat fall byt ambulans. Glöm inte att alltid skriva in detta i kontroll databasen, de ansvariga får automatiskt ett mail om felet och kan åtgärda det hela.

Kontroll av det inbyggda modemmet i mobimedden

När man tar bort mobimedden från dockan använder man endast det inbyggda GPRS-modemet i mobimedden för kommunikation. Om man har problem med uppkopplingen med det interna modemmet märks det endast när man ta bort den från dockan eftersom mobimedden väljer CDMA-modemet om uppkoppling med detta finns.

Ta bort mobimedden från dockan. Ikonen "KronNet" längst upp till höger ska efter en stund bli som vanligt (ej överstruken). Detta kan dock dröja någon minut efter att moobimedden tagits bort från dockan.

Vid fel

Notera i kontroll databasen att mobimedden inte fungerar utanför bilen. OBS att det kan vara dålig nättäckning exempelvis i ett garage. Om alla mobimedder har samma bekymmer kan det vara nätet som krånglar. Finns det uppkoppling när den sitter i dockan men inte utanför går den ju att använda i bilen. Ansvarig för mobimed felsöker.

2. Kontrollera att mätenheten fungerar

3. Kontrollera att VIS-datorn fungerar

Kontrollera att VIS-datorn fungerar

VIS-datorn använder samma nät som mobimedden när sistnämnda sitter i dockan. Om inte VIS-datorn har ett fungerande nät så har förmodligen mobimedden endast uppkoppling med det interna modemmet (GPRS) alltså ett sämre nät. Kontrollera då det externa modemmet (CDMA), se ovan eller be om hjälp.

Logga in i VIS-datorn

Nätverkskabel i datorn

Om det finns nätverkskabel i VIS-datorn används den gamla sortens


modem.

Sätt i E-legitimationen i kortplatsen på datorns vänstra sida.

Följande dialogruta syns på skärmen.

Välj det övre certifikatet (LTK)

Klicka OK

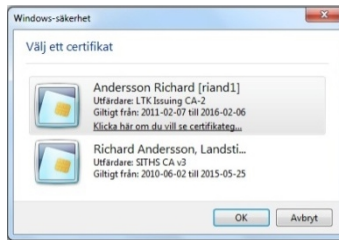

Följande dialogruta syns på skärmen.

Ange här din PIN-kod och tryck ok



Följande dialogruta syns på skärmen.

Ange här ditt användarnamn och lösenord (den vanliga inloggning



Följande dialogruta syns på skärmen.


Klicka på "Cosmic TS"

Giltig fr.o.m: 2018-05-01


Giltig t.o.m: 2020-03-15

Identifierare: 45077

Daglig kontroll av nätverkskommunikation för Mobimed och VIS-dator Ambulansverksamheten

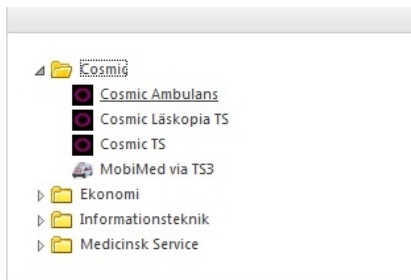

Den vanliga cosmicvyn kommer upp på skärmen.
Vänta tills namnet kommer upp, klicka sedan ”Logga in”

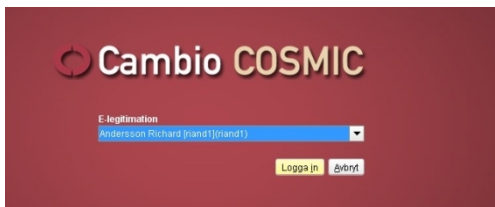

Logga åter in med E-legitimationsuppgifterna i följande dialogruta.



För att vända bilden på skärmen klicka på tredje knappen från vänster under bildskärmen.

När man drar ut E-legitimationskortet loggas man automatiskt ut från alla inloggningar man gjort.

Ingen nätverkskabel i VIS-datorn

Om VIS-datorn inte har nätverkskabel används det nya modemmet och VIS-datorn är kopplad över WIFI. Då använder man datorn precis som man gör inne på sjukhuset. Logga in med användarnamn och lösen i datorn och sedan med kort vid inloggning i Cambio Cosmic.

Giltig fr.o.m: 2018-05-01

Giltig t.o.m: 2020-03-15

Identifierare: 45077

Daglig kontroll av nätverkskommunikation för Mobimed och VIS-dator Ambulansverksamheten



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare