

Kontroll av fordon och utrustning Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Som ett led i ambulansverksamhetens kvalitetsarbete ska alla ambulanser vara kontrollerade enligt riktlinje och det gäller fordon, utrustning samt läkemedel. Detta för att brister ska upptäckas i tid och förhindra att behandling fördröjs eller uteblir helt.

Daglig kontroll ska ske enligt av arbetsledningen fastställd checklista. Se nedan. Utökad kontroll ska göras enligt instruktion från arbetsledningen.

Besättningen ska så snart som möjligt vid arbetspassets början kontrollera ambulansen och dess utrustning enligt checklistor/innehållsförteckningar.

Vid fordonsbyte under pågående arbetspass ska ny kontroll göras.

Signering av fordon

Efter kontroll ska en signatur bekräfta att kontrollen är utförd och av vem. Signering görs i avsedd databas.

Om brister upptäcks, antecknas dessa i databas.

Om personalbyte sker under pågående arbetspass gäller fortfarande signaturen från passets början.

Om fordon byts under arbetspasset ska signering göras av det nya fordonet.

Låsning av fordon

Tjänstgörande personal på bilen ska ha var sin uppsättning bilnycklar.

Vid alla situationer där bilen lämnas utan uppsikt ska den låsas, detta gäller även vid akuta uppdrag.

Ambulanserna ska vara låsta vid uppställning i ambulanshall och garage.

Daglig kontroll Sjukhytt

Mobimed	Funktionstest mobimed - mätenhet/ Omstart/ Kontroll ID
Akutväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest / Läkemedelskontroll
HLR-väska/Barnväska/ Förbandsväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Defibrillator	Kontrollera batteri/ Överensstämmer med innehållsförteckning
Syrgasväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Bärbar syrgastub bytes vid rödmarkering
Infusionsvärmare	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Fast installation Syrgastuber/Sug	Funktionstest – Fast syrgastub byts vid tom tub
LUCAS	Kontrollera batteri/ Överensstämmer med innehållsförteckning
Immobiliseringsutrustning	Överensstämmer med innehållsförteckning
Hygienåtgärder	Handsprit / Överensstämmer med innehållsförteckning
Bår/Bärstol/Förflyttningshjälpmedel	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Strömförsörjning/ Inverter/ Underhållsladdning	Funktionstest

Daglig kontroll Fordon

Belysning/ Däck/ Olja/ Kylarvätska/ Spolarvätska	Kontroll / Funktionstest
Larmutrustning	Funktionstest
Övrigt fordon	Bränslenivå/ Ficklampa/ Bälteskniv/ Block pennor
MIMMS-väska/Västar/Hjälmar	Överensstämmer med innehållsförteckning
PS-checklista/FSP checklista/GUL- rapport	Överensstämmer med innehållsförteckning
Telefoner	Funktionstest
Fordonsdator / Pandora	Funktionstest
Kartor/ Nycklar/ Kamera/ Bränslekort	Överensstämmer med innehållsförteckning
RAKEL	Funktionstest/ Kontroll av rätt talgrupp
VIS-dator	Funktionstest

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktagämare