

Mätning och hantering av PEF mätare.

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent Barn- och ungdomsmottagningen
Mari Bergenholtz, Astma o KOL-sjuksköterska

Indikationer

- Grov skattning av lungfunktionen då spirometri inte är tillgänglig.
- Vid akutbehandling för att mäta behandlingseffekt.
- PEF-kurva för att påvisa eller utesluta variabilitet.
- För hemmonitorering hos vissa patienter. (tex. vid allergenexponering, labil astma, astmaexacerbation, ansträngning, yrkesmedicinska utredningar).

PEF (Peak Expiratory Flow) – mätare

Rekommenderad PEF-mätare inom Region Kronoberg är Mini Wrights PEF- mätare med EU skala.

Referensvärden som ska användas ska vara baserade på den mätaren.

Peak flow Adult

Peak flow Child

Rengöring av Mini Wright PEF-mätare

Ny patient

Sätt på ett nytt engångsmunstycke.

Efter varje patient

Häll ytdesinfektionsmedel på ett torkpapper och torka av PEF-mätarens utsida.

Byt ut enhetens all PEF-mätare en gång om året, så att funktion och säkerhet bibehålls.

Bestäm vem/vilka på enheten som är ansvarig/a och gör bytet i januari varje år.

Beställning

PEF-mätare finns att beställa på MA-depån i Karlskrona, beställs via Ekonomiportalen.

Sesamnummer: 19080. Minsta beställning 1 st

Fabrikat är Mini Wright standard med EU-skala.

Munstycke (engångs) till PEF-mätaren finns att beställa via Ekonomiportalen.

Sesamnummer: 11239 Minsta beställning 25 st

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.