

Provtagningsanvisning U-Kappa(Ig)/Krea kvot, Pt(U)-Kappakedja(Ig)-uts

Utförs på:
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö



1 Indikation

Diagnostik och uppföljning av myelom, andra myeloproliferativa sjukdomar samt AL-amyloidos.

2 Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

3 Provtagning och provhantering

Pt(U)-Kappakedja(Ig)-uts: Urin samlas i plastdunk utan tillsats under ett dygn. Ange samlingstiden. Hela urinmängden lämnas in på vårdcentral eller sjukhusen Klinisk kemiska laboratorium.

U-Kappa(Ig)/Krea kvot: Urinrör, vakuum (beige kork)
Förvaring: Urin hållbar 2 dygn i rumstemperatur, 6 dygn vid 2-8°C.
Förvaring i frys rekommenderas ej.

4 Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

5 Analysfrekvens

Vardagar

6 Referensintervall, beslutsgräns

U-Kappa(Ig)/Krea kvot <0,6 mg/mmol
Pt(U)-Kappakedja(Ig)-uts <6 mg/dygn

7 Bedömning

Förhöjda värden kan ses vid tubulusskada, samt vid överproduktion av monoklonala kappakedjor, t ex vid myelom, andra myeloproliferativa sjukdomar och vid AL-amyloidos.

8 Kommentarer

Analyserna ingår i paketet U-M-komponent stickprov och U-M-komponent utsöndring.

9 Kod

U-Kappa(Ig)/Krea kvot NPU28869
Pt(U)-Kappakedja(Ig)-uts NPU28950