

## Provtagningsanvisning B-Trombocyter, citrat

**Utförs på:**  
Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby  
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

### 1 Indikation

Misstanke om pseudotrombocytopeni.

### 2 Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

### 3 Provtagning och provhantering

**Venprov:** Citratrör, koagulation  
**Centrifugering:** Centrifugeras ej  
**Förvaring:** Blodprov taget i citratrör hållbart 5 timmar i rumstemperatur eller i kyl 2-8 °C.

### 4 Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

### 5 Analysfrekvens

Akut/Dagligen

### 6 Referensintervall, beslutsgräns

Svar lämnas utan referensintervall.

### 7 Bedömning

B-Trombocyter, citrat ger generellt lägre värden än B-Trombocyter taget i EDTA-rör. Om pseudotrombocytopeni föreligger, kommer B-Trombocyter, citrat däremot att vara signifikant högre än B-Trombocyter taget i EDTA-rör.

Pseudotrombocytopeni kan förekomma vid bl. a. följande tillstånd:

- Trombocyttaggregat pga EDTA- eller trombocyt-specifika antikroppar.
- Mycket stora trombocyter vid Bernard-Soulier syndrom
- Myeloproliferativa sjukdomar
- Trombocyt-satellitism (= adherens till neutrofila granulocyter)

### 8 Kod

FLX00243