

Instruktioner för etiketter, Cosmic

Beställning

- Etiketter och färgband beställs på Marknadsplatsen.
- Tänk på att använt färgband och etiketter ska hanteras som sekretessmaterial.

Etiketthantering

Venprov

- Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork.
Felplacerade etiketter kan ej läsas av analysinstrumenten på laboratoriet.
- Klistra alltid etiketten på eventuell befintlig rötetikett.
Rörets innehåll måste kunna ses.
- Vid eventuellt byte av etikett klistras den nya över den gamla.



Odelad etikett



Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork.



Mikroprov

- På EDTA-rör (lila kork) klistras streckkodsetiketten lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork såsom för venprov.
- På övriga mikrorör sätts röret ihop med rörförlängare och streckkodsetiketten placeras på det sammansatta röret.



Urinprov

- Vakuüm rör och plaströr med konisk botten märks på samma sätt som venprov. Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, under rörets kork.
- Plastflaska för urinsamling – Sätt alla streckkods-etiketterna (för alla önskade analyser) på kärlet.



Övrigt

- Övriga kärl – Sätt streckkodsetiketterna på kärlet.

Specialanvisningar för vissa analyser


Vid ”Välj rör efter analys” skriv ut det antal etiketter som behövs till beställningen (se provtagningsanvisningar – Vårdgivarwebb). Ange provtyp (system) i ”provtagarens kommentar”.

Iohexolclearance:

Märk rören med datum och tid



Etikettförklaringar



Patientidentitet
Personnummer och namn

Prioritet

Bokstav för respektive laboratorium
K – Kemi **M** – Mikrobiologi **P** - Patologi

Kod för svarsmottagande enhet

Provtagningsinformation
Analysnamn
Rörets korkfärg

LID-nummer i klartext och streckkod