

## Rutin

**Process:** 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

**Område:** Provtagning och diagnostik

**Giltig fr.o.m:** 2018-07-02

**Giltig t.o.m:** 2020-07-02

**Faktaägare:** Kristina Rönn, IT-systemansvarig, Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

**Fastställd av:** Annika Petersson, Verksamhetschef, Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

**Revisions nr:** 4

**Identifierare:** 71670

# Instruktioner för etiketter, Cosmic


## Beställning

- Etiketter och färgband beställs på Marknadsplatsen.
- Tänk på att använt färgband och etiketter ska hanteras som sekretessmaterial.

## Etiketthantering

### Venprov

- Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork.  
Felplacerade etiketter kan ej läsas av analysinstrumenten på laboratoriet.
- Klistra alltid etiketten på eventuell befintlig rötetikett.  
Rörets innehåll måste kunna ses.
- Vid eventuellt byte av etikett klistras den nya över den gamla.

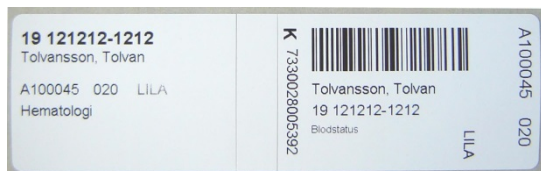

Odelad etikett



Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork.



### Mikroprov

- På EDTA-rör (lila kork) klistras streckkodsetiketten lodrätt med rätt sida uppåt, direkt under rörets kork såsom för venprov.
- På övriga mikrorör sätts röret ihop med rörförlängare och streckkodsetiketten placeras på det sammansatta röret.



### Urinprov

- Vakuüm rör och plaströr med konisk botten märks på samma sätt som venprov. Streckkodsetiketten klistras lodrätt med rätt sida uppåt, under rörets kork.
- Plastflaska för urinsamling – Sätt alla streckkods-etiketterna (för alla önskade analyser) på kärlet.



### Övrigt

- Övriga kärl – Sätt streckkodsetiketterna på kärlet.

## Specialanvisningar för vissa analyser


Vid ”Välj rör efter analys” skriv ut det antal etiketter som behövs till beställningen (se provtagningsanvisningar – Vårdgivarwebb). Ange provtyp (system) i ”provtagarens kommentar”.

### Iohexolclearance:

Märk rören med datum och tid



## Etikettförklaringar



**Patientidentitet**  
Personnummer och namn

Prioritet

Bokstav för respektive laboratorium  
**K** – Kemi **M** – Mikrobiologi **P** - Patologi

Kod för svarsmottagande enhet

**Provtagningsinformation**  
Analysnamn  
Rörets korkfärg

LID-nummer i klartext och streckkod