

Att välja rätt lansett

Gul/blå lansett

Nållansett 1,8 mm stickdjup och 26 G (ju högre tal desto finare), relativt skonsam. Kontaktulöst, lansetten aktiveras genom att den trycks ner mot fingret. Används för provtagning då det räcker med en mindre mängd blod, till exempel vid provtagning för analys av Glukos eller CRP med patientnära instrument.




Gul lansett

Bladlansett, stickdjup 1,0 mm.

Aktiveras genom att den gula knappen trycks in.

Eftersom den inte sticker djupt kan den användas bland annat för provtagning på barn under ett år.

Flödet kan bli rätt bra eftersom lansetten sticker med ett litet blad.

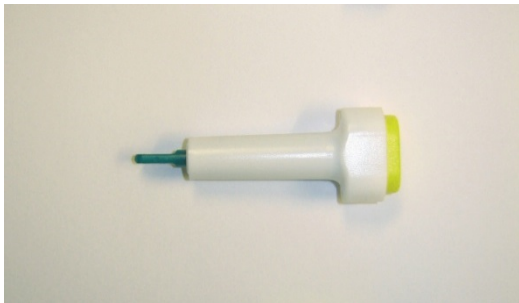

Röd lansett

Bladlansett, stickdjup 2,0 mm.

Aktiveras genom att den röda knappen trycks in.

Högflöde, används vid provtagning för större volym blod till exempel för att fylla mikrorör.

