

Byte av Artär eller Ventrycksmätare.

Orsak:

Filtret på tryckmätaren fungerar inte.
Blod eller koksalt kan ha kommit upp i filtret.
Materialfel.

Åtgärd:

1. Minska blodflödet så att larmgränserna vidgas.
2. Sätt peang på slangen eller stäng klämman till den tryckmätare som ska bytas.
3. Skruva bort tryckmätaren från maskinen. Låt peangen/klämman vara kvar.
4. Tag fram en ny tryckmätare och skruva fast på blodslangen. Anslut artärtrycksmätaren till den korta slangen innan blodpumpen.
Anslut ventrycksmätaren till den korta slangen på luftvakten.
5. Öppna klämman på den korta slangen.