


Långtidsblodtryck ABTM via Cosmic

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Mari Bergenholtz, samordnare hälso- och sjukvårdsutveckling
Åsa Wikingsson, informationsteknik


Spela in ett ABTM-test – Ambulatorisk blodtrycksmätning

1. Logga in i datorn med ditt **eget användarid**.
2. Anslut blodtrycksmätaren till datorn. Viktigt att alltid använda samma USB-port som användes när mätaren installerades första gången.
3. Logga in i Cosmic.
4. Sök fram rätt patient i Cosmic.
5. Välj **Meny- Externa applikationer -Ta ABTM/Spirometri**.

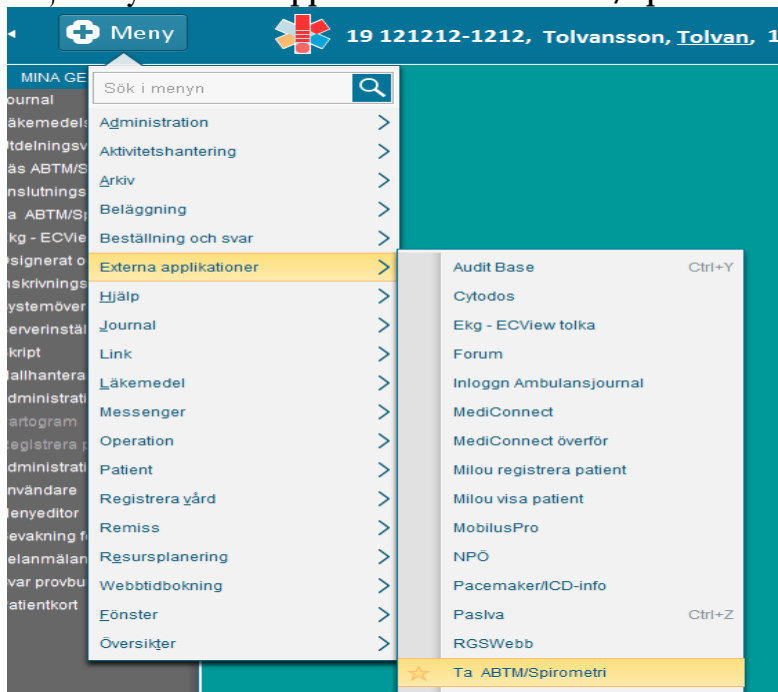


6. Programmet CardioPerfect startar.

7. Klicka på knappen **ABTM**.

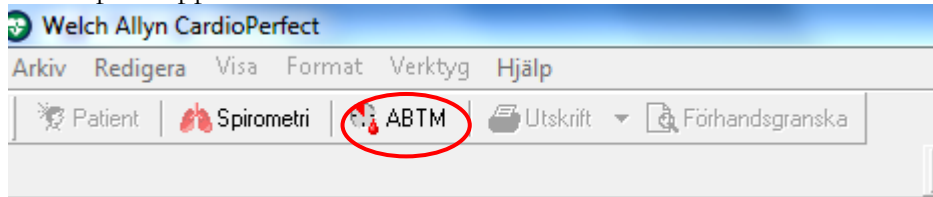


8. Välj typ av utrustning som ska användas vid undersökningen. ABPM 7100 eller ABPM 6100.

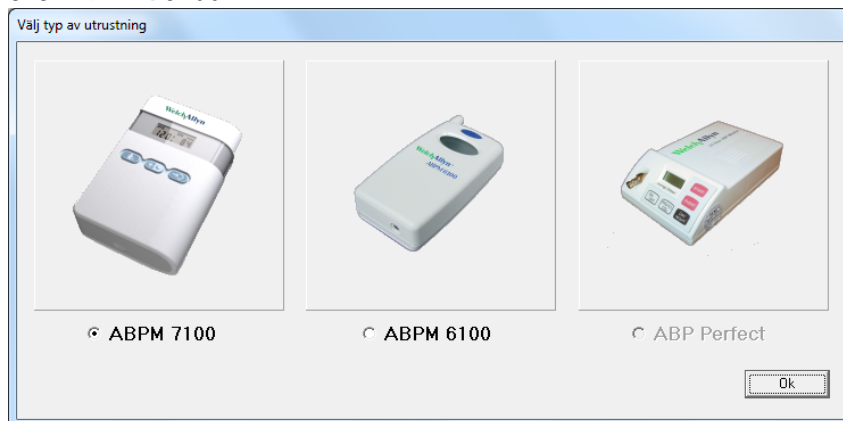

Klicka på Ok.

9. Välj det protokoll du vill använda för testet från listan **Protokoll**.


10. Klicka på **Ok**.

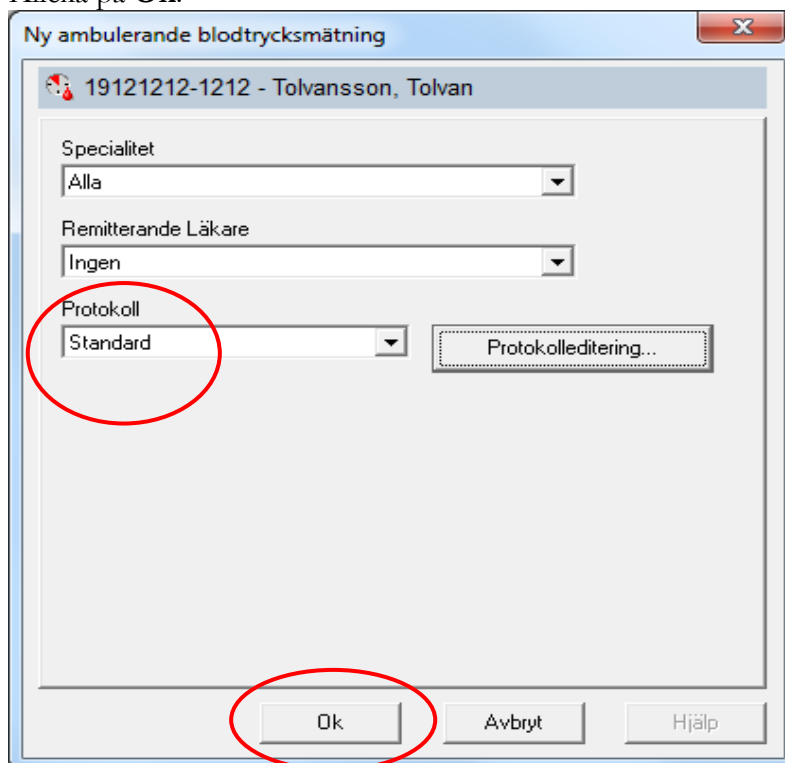


11. Koppla bort blodtrycksmätaren från datorn.
12. Följ därefter anvisningar på Vårdhandboken [Blodtrycksmätning ambulatorisk – praktiskt genomförande](#)

Läsa in utförd mätning


1. Logga in datorn med ditt **eget användarid**.
2. Anslut blodtrycksmätaren till datorn.
3. Logga in i Cosmic.
4. Sök fram rätt patient i Cosmic.
5. Välj **Meny- Externa applikationer -Ta ABTM/Spirometri**.

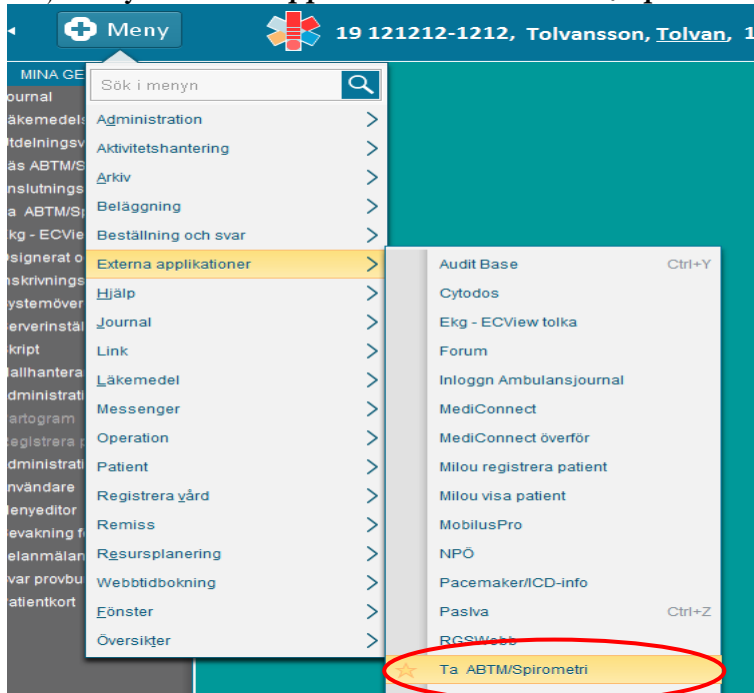

6. Programmet CardioPerfect startar.
7. Klicka på knappen **Läs in mätvärden**.

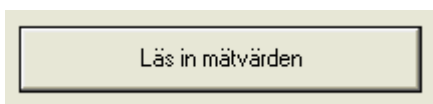


8. Välj typ av utrustning som har använts vid undersökningen. ABPM 7100 eller ABPM 6100.

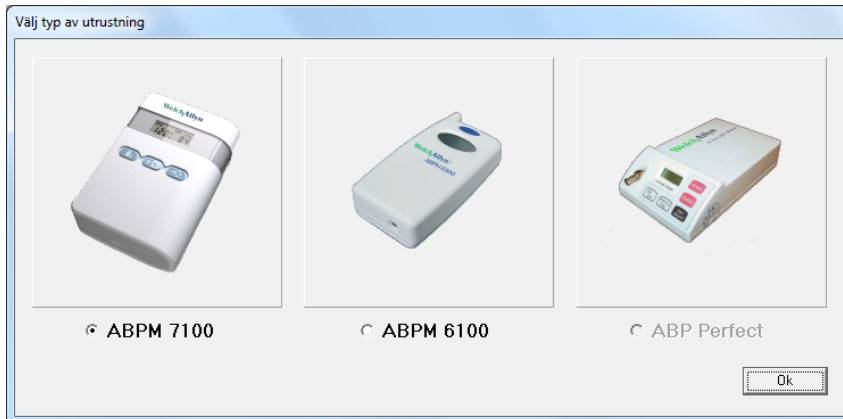


Klicka på **Ok**.

9. Justera eventuellt värdena för patientens faktiska nattperiod.

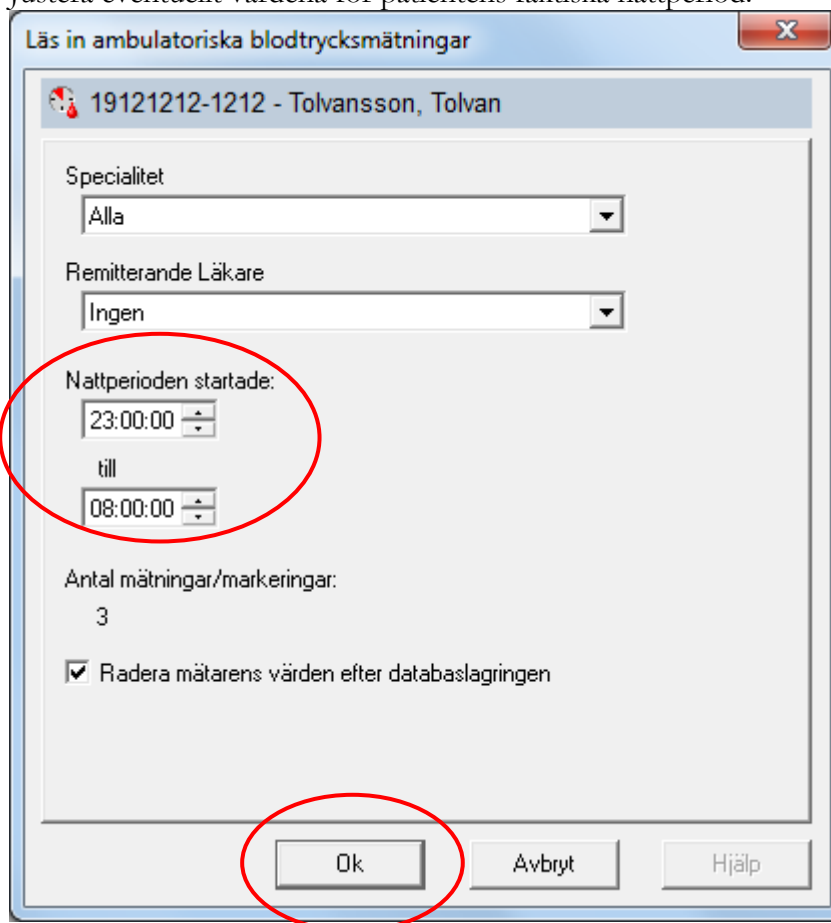

10. Klicka på **Ok**. Registrerade värden förs över från mätaren till datorn. Efter att mätningarna överförts till datorn, töms mätaren med automatik.


11. Eventuella kommentarer till testet skrivs i rutan **Information**. Klicka därefter på **Ok**.
Övrig information om testet t.ex. tolkning och eventuella åtgärder ska dokumenteras i patientens Cosmic Journal.

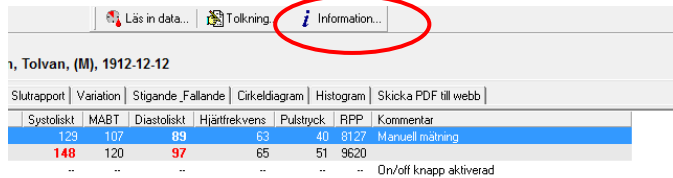

Information...

1, Tolvan, (M), 1912-12-12

Slutrapport	Variation	Stigande_Fallande	Cirkeldiagram	Histogram	Skicka PDF till webb	
Systoliskt	MABT	Diastoliskt	Hjärtfrekvens	Pulstryck	RPP	Kommentar
123	107	89	63	48	8127	Manuell mätning
148	120	97	65	51	9620	
..	On/off knapp aktiverad

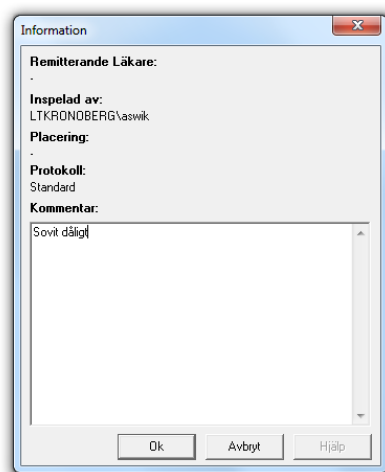

Information

Remitterande Läkare:
.

Inspelad av:
LTKRONOBERG/Vasvik

Placering:
.

Protokoll:
Standard

Kommentar:
Sovit dåligt

Ok Avbryt Hjälp


12. Avsluta alltid testet med att klicka på fliken **Skicka PDF till webb**.



19121212-1212 - Tolvan, (M), 1912-12-12


Mätningar	Tidintervall	Profil	Slutrapport	Variation	Stigande_Fallande	Cirkeldiagram	Histogram	Skicka PDF till webb
Nr	Inspelad	Systoliskt	MABT	Diastoliskt	Hjärtfrekvens	Pulstryck	RPP	Kommentar

13. Klicka därefter på den gröna symbolen

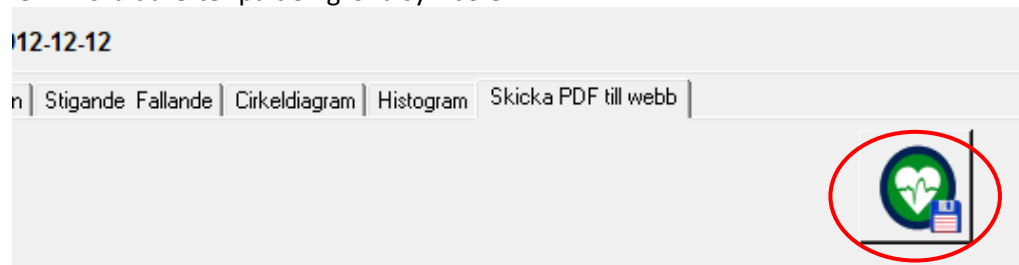

14. Testet **sparas och skickas** till CardioPerfect webbapplikation.
Kontrollera alltid att testet går att titta på via **Cosmic**. Sök fram rätt patient i Cosmic.

15. Välj Meny- Beställning och svar – Läs ABTM/Spirometri.

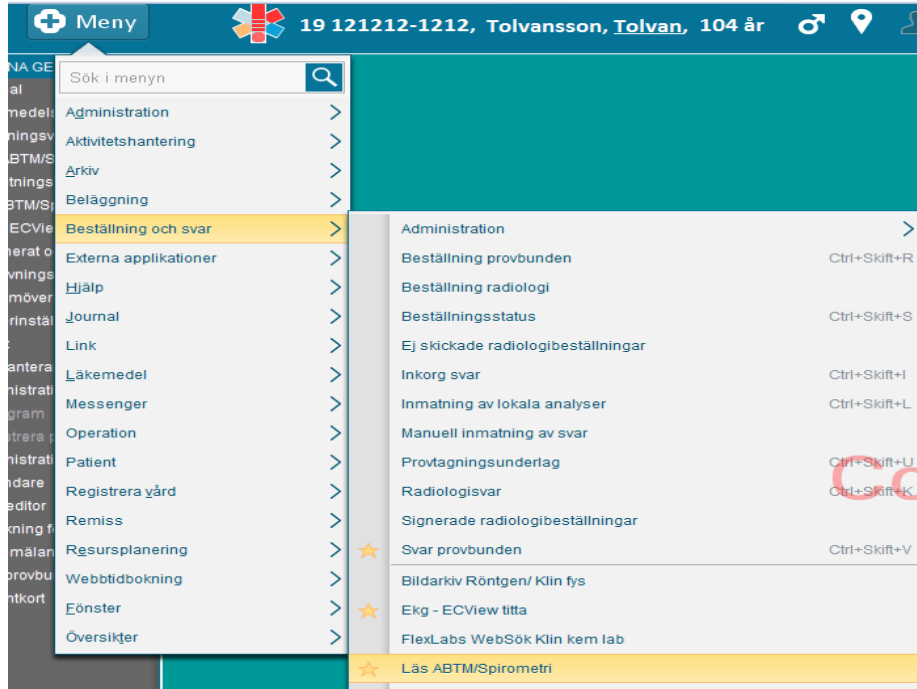

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.