

LDL-aferes Checklista 4008 ADS

Medicinkliniken Växjö

Datum _____

DALI KIT _____

DALI priming solution 3000 ml
med 5 ml Heparin 5000E/ml _____

DALI priming solution 3000 ml _____

Sign

Kontroller före start

- Starta maskin
- Välj behandlingsmetod _____
- Starta TEST, invänta godkänt
- Sätt upp slangar enligt schema
- Välj DALI-konfiguration _____
- Starta FYLLNING av systemet
- Extrafyll adsorbern manuellt
- Skaka adsorber
- Justera vätskenivå i venkammare
- Genomför SPOLNING
- Sätt alu-folie runt adsorbrar

Kontroller vid start

- Ge ev ordinerad infusion före behandlingen. Enligt ordination.
- Anslut inloppsslangen
- ACD-pump inställd _____
- Ställ in målblodvolym _____
- Anslut returslang då blod detekteras
- Starta behandlingen Öka blodflödet enligt schema
- Utgående larm: Ljud och ljussignaler fungerar.

Kl	Bltr	Blod- flöde	ACD- pump	Inlopps tryck	Retur tryck	Adsorber tryck	Behandlad blodvolym	

Slutavläsning Bltr.....ACD.....Behandlad blodvolym.....Tid.....