

Förteckning pacemakerdosor och elektroder

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Pacemaker

OBSERVERA:

- Om patienten har Osypkaelektroder ska SJM-dosa väljas!
- Om befintlig elektrod behöver justeras finns det bl.a. olika styket kit till olika elektroder. Därför måste det beställas inför operationen. Remitterande läkare måste kontakta pacemakermottagningen för leverans i tid.
- Vid dosbyte- kontrollera fattning för befintliga elektroder innan val av dosa. Observera att CRT kan behöva förprogrammeras

Enkammardosor (SR)

Modell	Tillverkare	Fattning	Observanda
Assurity MRI SR PM1272	SJM/Abbot	IS-1	Trådlös.
Ensura S MRI	Medtronic	IS-1	

Om patienten har två elektroder och man vid dosbyte vill nedgradera till enkammarpacemaker är det bättre ur säkerhetssynpunkt (perforationsrisk) att välja en tvåkammarpacemaker och programmera i VVI(R).

Tvåkammarpacemakardosor (DR)

Modell	Tillverkare	Fattning		Observanda
		A	RV	
Vitatron Q80 (restad f n)	Medtronic	IS-1	IS-1	AV-search, sämre EGM, MVP
Azure S DR	Medtronic	IS-1	IS-1	Bättre EGM, MVP
Assurity MRI DR PM2272	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	Trådlös

CRT-P-dosor

Modell	Tillverkare	Fattning			Observanda
		A	RV	LV	
Allure PM 3222	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	IS-1	Trådlös, ffa vid dosbyte, SKA BESTÄLLAS EJ MRI-villkorad
Quadra Allure MP PM 3562	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	IS-4	Trådlös
Solara MRI W4TR06	Medtronic	IS-1	IS-1	IS-4	Trådlös, vid uppgradering fr PM SKA BESTÄLLAS

Elektroder

Förmak

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Capsurefix, 4076	52 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär
Tendril STS 2088TC	52 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv bipolär

Högerkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Capsurefix 4076	58 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär
Tendril STS 2088TC	58 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv

Vänsterkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Quartet 1458Q	75/86 cm	SJM/Abbot	IS-4	Fyrpolig till CRT-P
Performa S-shaped	88 cm	Medtronic	IS-4	Fyrpolig till CRT-P REPRESENTANT FÅR TA MED SIG ELEKTROD(ER)

Standardval vid nyimplantation:

(Alla nedanstående system är MR-kompatibla helkropp)

VVI Assurity MRI SR+ Tendril STS 58 cm

DDD: **AV-block**
Assurity MRI DR+ Tendril STS 52 cm+ Tendril STS 58 cm

SSS

1. Azure S DR + Capsurefix 4076 52 cm + Capsurefix 4076 58 cm
välj om arytmidiagnostiken förväntas vara av stort intresse.

2. Vitatron Q80 + Capsurefix 4076 52 cm + Capsurefix 4076 58 cm
fördel: AV-search nackdel: något sämre EGM (restnoterad)

CRT-P 1. Quadra Allure MP PM 3532 + Tendril STS 52 cm+ Tendril STS 58cm+ Quartet 1458Q

2. Solara MRI + Capsurefix 4076 52 cm + Capsurefix 4076 58 cm + Performa S-shaped 88 cm

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.