

Vattenanläggning – rutin för handhavande

Gäller för: Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Förbehandling:

Förbehandlingen är placerad utanför avdelningen i rum E 5101, i korridoren belägen mot avdelning 3. Personalen på dialysenheten är behöriga att öppna med sina passerkort.

Kontroll dagligen

Innan dagens dialysskift påbörjas ansvarar blå sidas personal för att kontrollera följande:

- Hårdhetstest (Rum E 5101) kontrolleras enligt anvisning anslagen på väggen till höger innanför dörren ”Hårdhetstest av vatten efter avbärningsfilter A & B”
Datum, resultat samt signum noteras på
”Driftprotokoll förbehandling CWP 100” (id 84835) i rum E 5101.
- Konduktiviteten (Rum E 5127) avläses på CWP 1 och CWP 2.
CWP 1 försörjer sal 5,6 7, teknikrum och apparatförrådet med vatten.
CWP 2 försörjer sal 1,2, 3 och 4 med vatten.
Datum, resultat samt signum noteras på
”Driftprotokoll CWP 100” (id 84851) i rum E 5127.

Kontroll 1g/vecka

Vattenansvariga sjuksköterskor kontrollerar 1g/v följande:

- Klortest
- Klockorna på kolfilter A och B
- Tryck på inkommande vatten samt tryck över partikelfilterna
- Saltnivå, kontakta fastigheter då utmärkt minimigräns närmas.
- Samtliga resultat noteras på loggbladet
”Driftprotokoll förbehandling CWP 100” (id 84835) i rum E 5101

Mikrobiologisk/kemisk kontroll

Sektionsledare ansvarar för mikrobiologisk och kemisk provtagning enligt enhetens rutin ”Provtagningschema gällande ingångsvatten, vatten för tillredning, hemodialys- samt hemofiltrationsvätska” (id 78658).

Skötsel

Fastigheter ombesörjer påfyllning av salttabletter samt byte av partikelfilter 1g/månad. Åtgärder noteras samt signeras i loggbok.

Larm

Vid larm på vattenanläggningen följ rutinerna enligt *"Larmlista för användare"*. Kontaktnummer till vattenansvarig på Baxter är 046-16 96 60. Skulle den ena anläggningen krångla kan alla maskinerna köras på en slinga, kontakta landstingsfastigheter för hjälp att koppla om. Schema för omkoppling finns i rum E 5127.

Dialysbehandling när vattenanläggningen normalt inte är i drift

Ställ med nyckeln om den CWP som ska användas till läge MAN. Vattenanläggningen går då över till normaldrift oavsett vilket läge den befinner sig i. Invänta grönt sken innan dialysmaskinen startas. Kylningen av vattenanläggningen kan ta upp till 60 minuter. Om behandlingen inte kan vänta använd den portabla WRO: n på 7 salen. Efter att dialysen är avslutad ställs nyckeln först över i läge 0 därefter i läge AUTO.

Kontakter från vattenverket

Överenskommelse finns med vattenverket att de ska kontakta Dialysenheten vid driftstörningar eller förändring av vattenkvalitén. Informera ansvarig dialysläkare och notera på tekniskt loggblad (i rum E 5127) kontakter med vattenverket.

Datoriserat system

För beskrivning av Baxter externa loggnings system av specifika parametrar i CWP-anläggningen se rutin, *Datoriserade system vid dialysenheten i Växjö* (id 143603).

Förteckning över instruktioner utformade av Gambro (Baxter).

Instruktionerna finns anslagna i sitt originalutförande i rum E5127 samt F5101.

Förbehandlingsrum, F 5101

"Beskrivning samt förteckning av ventiler i vattenreningsystem för dialys" 20060210, Stefan Möller.

"Principflödesschema för vattenreningsystem med förbehandling och produktion av renat vatten" 20060210, Stefan Möller.

"Kolfilter A & B typ ACF 150" 20060210, Stefan Möller/Torgny Wijk.

"Avhärtningsfilter A & B typ WSDF75" 20060210, Stefan Möller/Torgny Wijk.

"Byte av partikelfilter" 20060210, Stefan Möller/Torgny Wijk.

"Hårdhetstest av vatten efter avhärtningsfilter A & B" 20060210 Stefan Möller/Torgny Wijk.

Vattenrum E 5127

”Beskrivning samt förteckning av ventiler i vattenreningsystem för dialys” 20060210.

Stefan Möller.

”In/Ur koppling av Fjärrmanövrering (nyckelbrytare)” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Inkoppling av CWP 1 till båda slingor” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Inkoppling av sterilfilter vid fel på CWP 1” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Inkoppling v CWP 2 till båda slingor” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Inkoppling av sterilfilter vid fel på CWP 2” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Åtgärder vid larm” 20050525, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Larmlista” 20060406, Stefan Möller/Torgny Wijk.

”Vattenreningsanläggning, beskrivning indikeringslyspelare” 051122, Stefan Möller.