

## Provtagningsanvisning för lever, gallblåsa, pancreas och mjälte

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Klinisk patologi och cytologi


### Lever:

Resektat lägges i formaldehyd utan att skäras upp ytterligare.

### Gallblåsa:

Uppklippes från fundusdelen, men inte genom collum, se bild nedan. Låt clipsen vara kvar.

Eventuella konkrement avlägsnas innan formaldehydfixering.

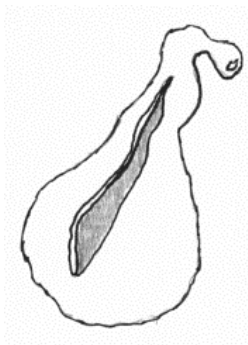

### Pancreas:

Om preparatet ej kan sändas färskt bör det fixeras helt i formaldehyd, helst med orienterande märksuturer motsvarande gallvägar och resektionsränder (fr a vid tumör). Ev vidhängande ventrikel eller tarm uppklippes enligt anvisningar (se tjocktarm och ventrikel) och nålas på korkskiva.

### Mjälte:

Kan formalinfixeras ouppskuren om operation göres pga trauma. Om specifik mjältsjukdom misstänkes bör snitt läggas från lateralsidan för att förbättra fixering och imprintpreparationer mm övervägas, varför kontakt med patologlab bör eftersträvas.