

**Rutin****Process:** 3.1.2 RGK Hantera samordning inom hälsa och vård**Område:** Provtagning och diagnostik**Giltig fr.o.m:** 2021-11-19**Giltig t.o.m:** 2025-11-19 00:00:00**Faktaägare:** Zsuzsanna Jönsson Zalay, överläkare / Klinisk patologi och cytologi**Fastställd av:** Sanda Beglerbegovic, Verksamhetschef / Klinisk patologi och cytologi**Revisions nr:** 4**Identifierare:** 44508

## Provtagningsanvisning för rektum

**Gäller för:** Region Kronoberg**Utförs på:** Klinisk patologi och cytologi

Colorektalpreparat klipps upp från oralt (proximalt) på framsidan (där tarmväggen inte är täckt av fettväv) fram till tumören (OBS! inte igenom tumören).

Skölj tarmen.

Nåla och spänn upp preparatet på korkskiva, serosaytan mot korkskivan. Sträckta resektionsränder är speciellt viktigt om tumör ligger nära denna.

Lägg preparatet i tillräckligt stor behållare, slemhinneytan nedåtvänd. Håll på 4 % buffrad formaldehyd, formaldehydmängden ska vara 6-10 gånger mer än preparatets volym.