

## Provtagningsanvisning för tjocktarm

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Klinisk patologi och cytologi

Colonpreparat klipps upp från både oralt (proximalt) inklusive eventuellt medföljande tunntarm och aboralt (distalt) på framsidan fram till tumören (OBS! inte igenom tumören).

Skölj tarmen.

Nåla och spänn upp preparatet på korkskiva, serosaytan mot korkskivan. Sträckta resektionsränder är speciellt viktigt om tumör ligger nära denna.

Lägg preparatet i tillräckligt stor behållare, slemhinneytan nedåtvänd. Håll på 4% buffrad formaldehyd, formaldehydmängden ska vara 6-10 gånger mer än preparatets volym.