

**Rutin****Process:** 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service**Område:** Provtagning och diagnostik**Giltig fr.o.m:** 2021-11-19**Giltig t.o.m:** 2025-11-19 00:00:00**Faktaägare:** Zsuzsanna Jönsson Zalay, överläkare / Klinisk patologi och cytologi**Fastställd av:** Sanda Beglerbegovic, Verksamhetschef / Klinisk patologi och cytologi**Revisions nr:** 4**Identifierare:** 44518

## Provtagningsanvisning för ventrikel

**Gäller för:** Region Kronoberg**Utförs på:** Klinisk patologi och cytologi

Preparatet bör om möjligt uppklippas utefter majorsidan. Därefter uppspännes det på en korkskiva med hjälp av nålar, resektionsränder proximalt och distalt sträcker ut så att radikalitetsbestämningen blir tillförlitlig. Serosaytan skall vara vänd mot korkskivan och slemhinneytan vänd nedåt i formaldehydburken. Abnormiteter som påträffas anges i anamnesen.

