


Lägga till/ byta mätenhet Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Genom att klicka på ikonen  kommer man direkt på den sidan där man lägger till och tar bort mätenheten.






Om man har en öppen journal:

Gå in i monitorläge, klicka ner till ikonen mätenhet.

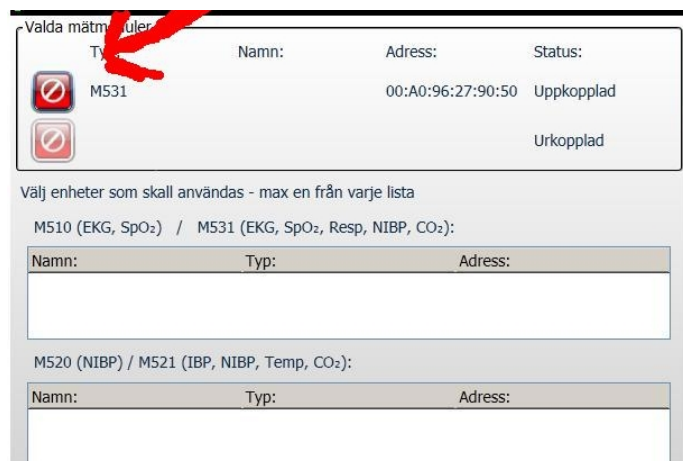

I detta fall är en mätenhet M531 med ID-nummer 00.**:50 redan uppkopplad. Ta bort den genom att klicka på knappen till vänster på aktuell rad innan du kopplar upp en ny. Endast **en** mätenhet från varje lista kan kopplas in samtidigt.



Typ	Namn	Adress	Status
 M531		00:A0:96:27:90:50	Uppkopplad
			Urkopplad

Välj enheter som skall användas - max en från varje lista

M510 (EKG, SpO₂) / M531 (EKG, SpO₂, Resp, NIBP, CO₂):

Namn:	Typ:	Adress:


M520 (NIBP) / M521 (IBP, NIBP, Temp, CO₂):

Namn:	Typ:	Adress:

Bekräfta borttagningen:



Tryck på strömknappen en gång på mätenheten så att den startar, den gula lampan blinkar snabbt. Tryck återigen in strömknappen på den mätenheten (och håll knappen intryckt **hela** tiden).

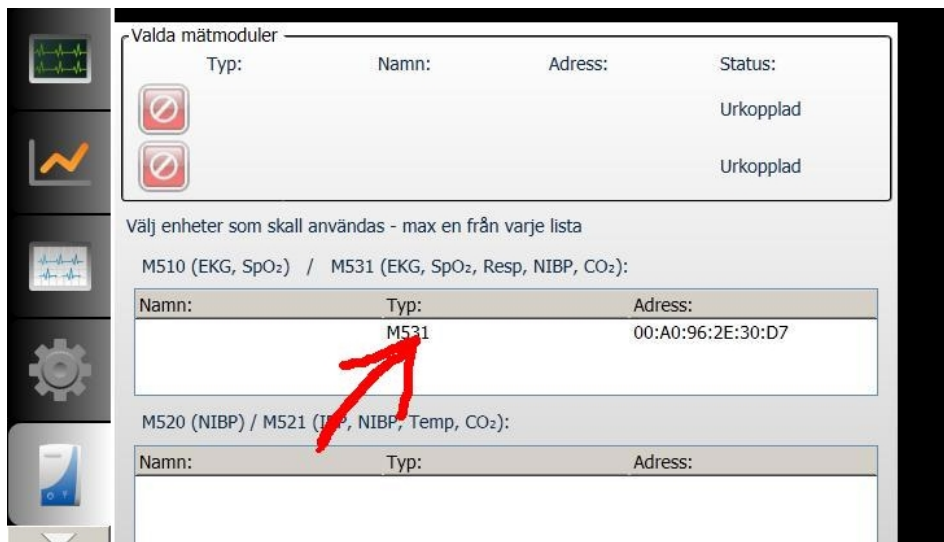

Klicka på raden som dyker upp i listan. Kontrollera att det står rätt ID (Adress) på raden. (Håll knappen på mätenheten fortsatt intryckt!!)



När mätenheten dykt upp som ”Uppkopplad” och ”Tryck modulens modulens På-knapp för att bekräfta” försvunnit går det bra att släppa knappen på mätenheten.



Adressen på mätenheten (**:**:**:**:**)** som ska visas står under batteriet på mätenheten, men även (oftast) på en klisterlapp på enheten.

OBS!!

I **enstaka fall** går det inte att koppla upp mätenheten pga att blåtandskortet i själva datorn hakat upp sig. Har du gjort som instruktionen ovan men det ändå inte fungerar, **Stäng då av mobimeddatoren** och starta den igen. Det räcker alltså inte att endast starta om eftersom datorn behöver vara strömlös en kort stund.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare