


Daglig kontroll av nätverkskommunikation för MobiMed Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

1. Kontrollera mobimeduppkoppling mot LTKronoberg (dockad MobiMed)

Om mobimedan har kontakt med sjukhuset ser det ut som nedan längst upp i höger hörn. (KronNet ska inte ha ett streck över sig)

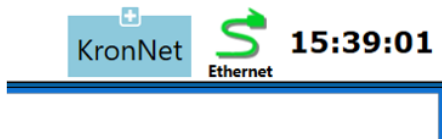


Om det ser ut som nedan har inte modemmet i bilen kontakt med nätet:




Vid fel:

Testa följande (men bara om du vet vad du gör...)

Detta är modemmet i teknikutrymmet (Digi transport):

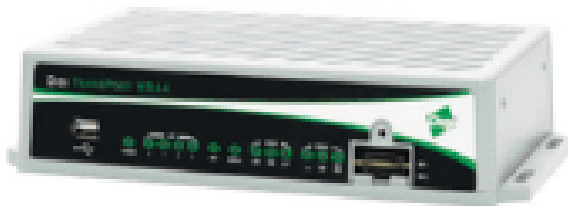


På baksidan i AUX (se nedan) sitter en vit kontakt med en flärp som måste tryckas ned när man drar ut den, se nedan. Dra ut denna så blir modemmet strömlöst och sätt in kontakten igen. Man behöver inte hålla den strömlös mer än en mkt kort stund.

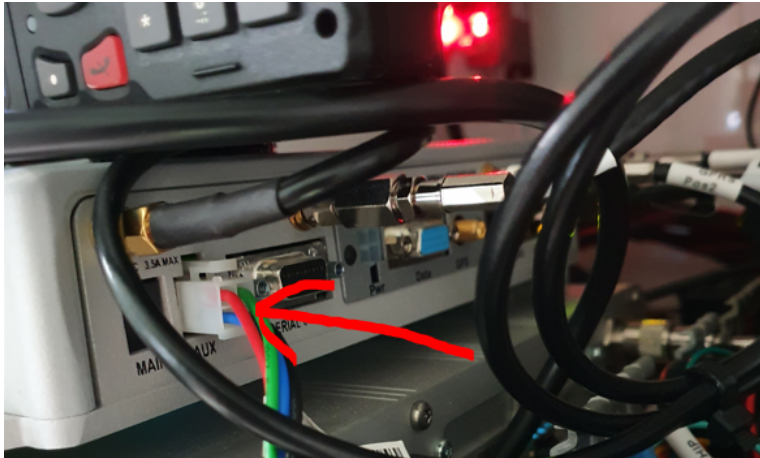

Efter någon minut bör du nu fått Ethernetsymbolen längst upp till höger.

2. Kontrollera även det interna modemmet i MobiMed-datorn när den inte är dockad

Ta bort MobiMed från dockningsstationen. Efter en stund ska det se ut som nedan. (Kan vara annan text än Telis SE beroende på roaming)

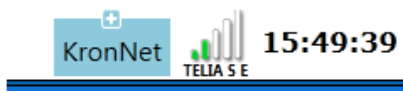

Om det istället ser ut som nedan fungerar inte uppkopplingen från modemmet i bilen




Det händer ganska frekvent att det inte går att logga in i MobiMed odockad. Då visar detta sig genom att det röda hänglåset är gult. Tänk på att man ändå kan skicka EKG samt istället signera journalen på en CWS eller när den är dockad.

Vid fel:

Stäng av MobiMed. (i detta läge är det bättre om du stänger av istället för att

endast starta om datorn)

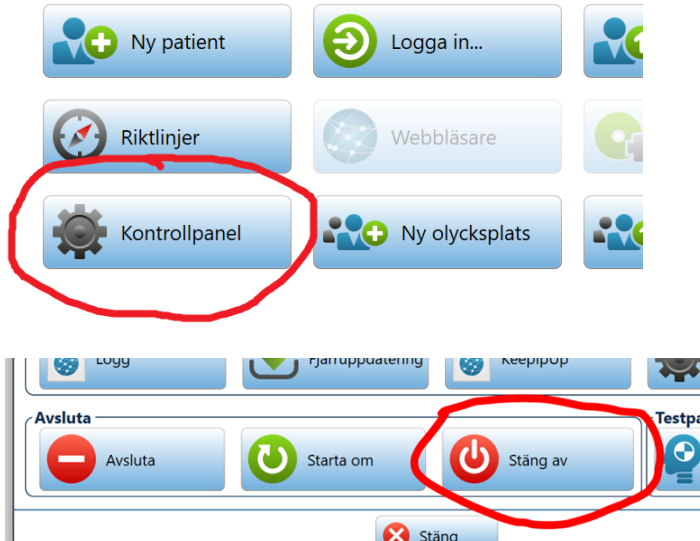

Sätt därefter på MobiMed igen. Inom någon minut bör det fungera igen.

Om det trots ovanstående problem inte fungerar, notera i KUFen.
Finns det uppkoppling när den sitter i dockan men inte utanför går den ju att använda i bilen och kanske in.

OBS också att det kan vara dålig nättäckning exempelvis i ett garage eller vissa platser i regionen med dålig mobiltäckning.

3. Kontrollera att mätenheten fungerar

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare